












İlk uygulayacağınız lens sağ lens olsun, aşağıdaki seçim tablosunu takip edin:

En iyi uzak ve yakın görme dengesi için		
ADİSYON	GÖZ	LENS SEÇİMİ
+0.75D'den +1.25D'ye kadar	Baskın Göz	 DÜŞÜK
	Baskın Olmayan Göz	 DÜŞÜK
+1.50D'den +1.75D'ye kadar	Baskın Göz	 ORTA
	Baskın Olmayan Göz	 ORTA
+2.00D'den +2.50D'ye kadar	Baskın Göz	 ORTA
	Baskın Olmayan Göz	 YÜKSEK

Uzak görme veya yakın görme için iyileştirmeye ihtiyaç duyan hastalar için	
İYİLEŞTİRİLMİŞ UZAK GÖRME	İYİLEŞTİRİLMİŞ YAKIN GÖRME
1-DAY ACUVUE® MOIST SPHERE	 DÜŞÜK
 DÜŞÜK	 DÜŞÜK +0.25D
 DÜŞÜK	 ORTA
 ORTA	 ORTA +0.25D
 ORTA	 ORTA
 ORTA +0.25D	 YÜKSEK +0.25D

^Baskın olmayan gözde uzak gücüne +0.25D ekleyin



Görme performansını değerlendirmeden önce 10 dakika gerçek yaşam koşullarına (muayene odası dışında) maruz kalmasına izin verin